



Full effekt mot:

Vegetative bakterier, virus, sopp og mykobakterier på 2 minutter. Sporer som f.eks. Clostridium difficile og Bacillus subtilis på 5 minutter. LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon og er enkel i bruk.

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av flater

- 1 Fjern synlig forurensning og vask før desinfisering. Jmf. NS-6600.
- 2 Bruk egnet åndedrettsvern ved langvarig eksponering og ved utilstrekkelig ventilasjon, i tillegg til bruk av hansker for å unngå uttørring av huden. Følg lokale retningslinjer.
- 3 Påfør LifeClean desinfeksjon på ønsket flate. Virketid 2-5 minutter. Se til at flaten er fuktig i virketiden, men ikke påfør for mye. Anbefalt mengde 40 ml per m²
- 4 Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter desinfeksjon dersom det er usikkerhet rundt materialkompatibilitet. Spesielt viktig på metall/stålflater.
- 5 Lukk LifeClean flasken og merk med åpningsdato. En åpen flaske er holdbar i 4 uker etter åpning.
- 6 Mindre overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til resirkulering.



Beskyttelse

Bruk egnet åndedrettsvern med filtertype B ved utilstrekkelig ventilasjon, og ved langvarig eksponering (over 15 min). Bruk hansker for å unngå uttørring av hud.

Påføring med mopp

Legg moppen på et flatt underlag under påføring, unngå å ha denne i ansikts høyde.

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av utstyr

- 1 Rengjør utstyret før desinfisering. Påfør LifeClean desinfeksjon.
- 2 Påfør LifeClean direkte på utstyret med klut, evt. legg utstyr som tåler det i en beholder med LifeClean.
- 3 Virketid 2 - 5 minutter.
- 4 Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter desinfeksjon dersom det er usikkerhet rundt materialkompatibilitet. Spesielt viktig på metall/stålflater.
- 5 Vask av utstyret etter virketiden.
- 6 Utstyr som er i kontakt med slimhinner skal, ifølge DMP skylles med sterilt vann. Evt. følg lokale retningslinjer.

Holdbarhet i kar:

LifeClean som er overført til annen beholder er holdbar og har effekt opp til 3 timer i åpen beholder og opp til 8 timer i lukket beholder.

Virketid:

2 minutter - virus, bakterier, mykobakterier og sopp
5 minutter - sporer

Generell informasjon

Desinfiser overflater i henhold til gjeldende prosedyrer. Det anbefales å tørke eller skylle av når lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.

Innhold

Klordioksid <0,2%, Saltsyre <0,2%, pH1.

Informasjon om håndtering, stabilitet og materialkompatibilitet, se sikkerhetsdatablad.