


Tristel DuoTM

ULT

For Endokavitære
Prober

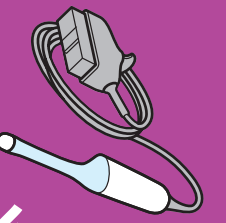

High-Level desinfeksjonsskum

Merk:

- Ikke bruk flasken om den er skadet.
- Rengjør hender og bruk egnet beskyttelsesutstyr under håndtering av desinfeksjonsmidler og medisinsk utstyr.
- Ved førstegangsbruk (ny flaske) Tristel Duo ULT, trykk ned pumpen to til fire ganger for å klargjøre den.
- Bruk Tristel Duo ULT på overflater som er tørket rene for ultralydgele.
- Om overflaten er synlig tilsmusset, følg sykehusets regler for rengjøring.
- Kun for profesjonell bruk.
- Dette Wall Chart skal brukes i kombinasjon med bruksanvisning (IFU), produkt etikett, Safety Data Sheet (SDS) og produsentens instruksjoner.

STEG 1



Fordel 2 doser skum Tristel Duo på egnet (lo-fritt), tørr serviett/papir (det er anbefalt å bruke Duo Wipes)


STEG 2



Benytt servietten til å fordele skummet over overflaten på proben og sørg for at alle områder er dekket. Det er ikke nødvendig å tørke gjentatte ganger på overflaten, og dette bør unngås for å sikre at servietten ikke loer. Om nødvendig, bruk en bomullspinne for å spre skummet i fordypninger.

Merk: Avfallshåndtering av brukt serviett gjøres i tråd med lokale bestemmelser. Må ikke oppløses. Må ikke re-brukes.

STEG 3

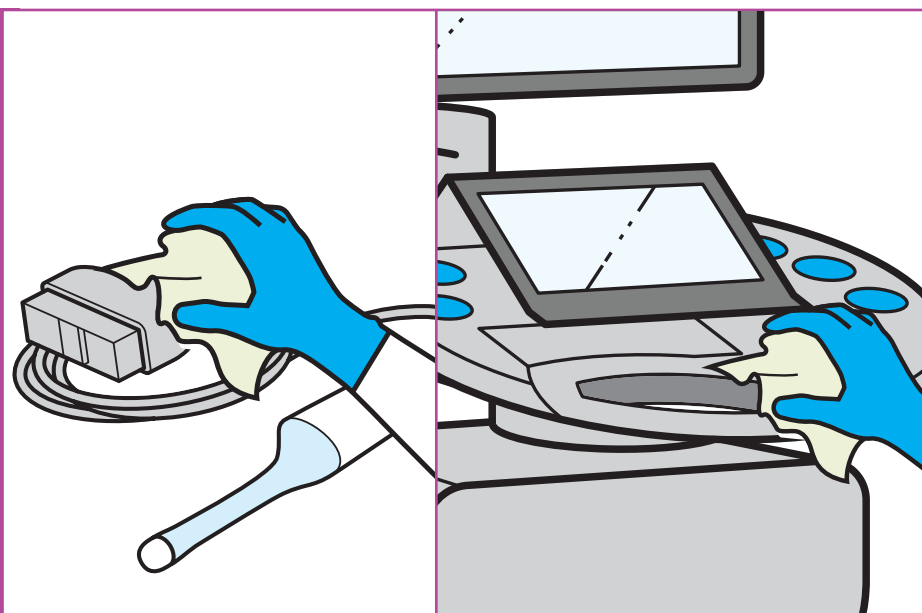

Bruk Tristel Duo ULT til high-level til desinfisering av overflater som kan komme i kontakt med probe, så som holdere, kabler og koblinger.

STEG 4



La overflater tørke for å sikre at det er minimum **30 sekunder** kontakt tid.

Merk: Oppbevar det medisinske utstyret i henhold til Sykehusets regelverk for å sikre det mot skade eller re-kontaminering.

TristelTM

Produsert av: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Distribuert av: Vingmed AS, Solbråveien 13, 1383 ASKER, Norway
T +47 67 58 06 80 - E info@vingmed-as.no - W www.vingmed-as.no

For Tristel patent informasjon gå til: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-1880-1
08 Feb 2022